



SELBSTTEST-GEBRAUCHSANWEISUNG (FLOWFLEX)

- 1 
- Tupfer ca. 2,5 Zentimeter in ein Nasenloch einführen
 - Das Stäbchen 5 Mal drehen, dabei sanft gegen die Schleimhaut pressen
 - Vorgang im anderen Nasenloch wiederholen

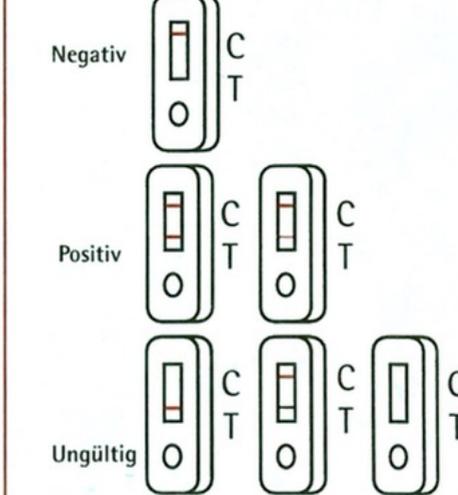
- 2 
- Röhrcchen mit Pufferlösung aufschrauben, ohne es zu drücken
 - Das Stäbchen einführen und 30 Sekunden umrühren
 - Röhrcchen zusammendrücken und währenddessen das Stäbchen mindestens 5 Mal drehen
 - Aufpassen, dass Flüssigkeit nicht aus dem Röhrcchen spritzt!

- 3 
- Stäbchen entnehmen und dabei Röhrcchen zusammendrücken
 - Kappe mit Tropferspitze fest aufdrehen
 - Röhrcchen wirbeln und schütteln

- 4 
- Testkassette aus der Verpackung nehmen und flach auf den Tisch legen
 - Kappe von der Tropferspitze abdrehen
 - Röhrcchen vorsichtig zusammendrücken und 4 Tropfen auf Testkassette tropfen (Vertiefung S)

- 5 
- 15 Minuten warten
 - Das Ergebnis ablesen

Ergebnisinterpretation

- 6 
- Negativ
- Positiv
- Ungültig

TEST-REGISTRIERUNG

Hier den Selbsttest „Flowflex“ registrieren:

www.vorarlberg.at/corornatest

Der registrierte Selbsttest bietet eine Zutrittsberechtigung für 24 Stunden.



Röhrcchen/
Extraktionspuffer



Stäbchen/Tupfer



Testkassette



Weitere Informationen zur COVID-19 Erkrankung erhalten Sie unter:

Land Vorarlberg: www.vorarlberg.at/vorarlbergtestet

Bundesministerium: www.sozialministerium.at